

Carthyal[®] one

2,5% de ácido hialurônico reticulado (75 mg)
1 seringa pré-cheia de 3 ml para injeção intra-articular

INDICAÇÕES

O Carthyal[®] one é um substituto do líquido sinovial que pode restaurar as propriedades fisiológicas e reológicas de articulações comprometidas, quando existe dor ou mobilidade reduzida causadas por doenças degenerativas ou pós-traumáticas.

DESCRIÇÃO DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS

O Carthyal[®] one é uma solução fisiológica tamponada, contendo 2,5% de ácido hialurônico reticulado com propriedades viscoelásticas significativas.

O hialuronato de sódio é um componente fundamental do líquido sinovial, sendo responsável pelas suas propriedades viscoelásticas específicas.

COMPOSIÇÃO

Ingrediente principal: Ácido Hialurônico Reticulado.

Outros ingredientes: Cloreto de sódio, tampão fosfato, água para soluções injetáveis.

AVISOS E CONTRAINDICAÇÕES

- Não usar após o prazo de validade impresso na caixa.
- Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- As injeções devem ser aplicadas em pele saudável.
- Não injetar nos vasos sanguíneos.
- Não injetar na articulação do joelho se existir estase venosa ou linfática do membro.
- Não injetar fora da cavidade articular, no tecido sinovial ou na cápsula articular.
- Não administrar em caso de efusões intra-articulares excessivas.
- O Carthyal[®] one não deve ser administrado em caso de infecções, inflamações ou doenças da pele na zona em questão.
- Após a injeção intra-articular, o doente deve ser aconselhado a evitar qualquer atividade física intensa e a retomar as suas atividades normais só após alguns dias.
- O conteúdo da seringa pré-cheia é estéril.
- A superfície externa da seringa não é estéril.
- Não esterilize novamente. O dispositivo é de uso único.
- Conservar a temperatura inferior a 28°C e afastado de fontes de calor. Não congelar.
- Após a sua abertura, o dispositivo deve ser usado imediatamente e eliminado após a sua utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.

EFEITOS SECUNDÁRIOS:

A injeção extra-articular pode causar efeitos secundários locais. A zona da injeção pode ficar dorida, quente, ruborizada ou inchada. Quando tal acontecer, pode revelar-se útil a aplicação de gelo na articulação tratada. Estes sintomas são reações normais e desaparecem em pouco tempo.

O médico deve assegurar-se que o doente o informa sobre qualquer eventual efeito secundário que possa ocorrer após o tratamento. Em casos raros, o produto pode causar reações alérgicas.

POSOLOGIA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Injetar 3 ml do produto na articulação a cada 6 meses, exceto se o médico decidir de outra forma; cada tratamento deve ser personalizado para cada doente individualmente.

Em função da opinião do médico e da saúde do doente, é possível tratar várias articulações em simultâneo.


A escala de volume nas seringas é meramente indicativa.

Carthyal[®] one é um dispositivo cuja utilização carece da mediação e decisão de um profissional de saúde.

A injeção intra-articular só deve ser realizada por um médico.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de injetar o Carthyal[®] one, remova por aspiração qualquer eventual derrame articular. Retire cuidadosamente a tampa da seringa de forma a evitar qualquer contato com a abertura. Insira uma agulha apropriada (de 18 a 22G), enroscando-a para garantir que está hermeticamente colocada e evitar derrame da solução. Injete o dispositivo médico apenas no espaço sinovial, à temperatura ambiente e em assepsia total.

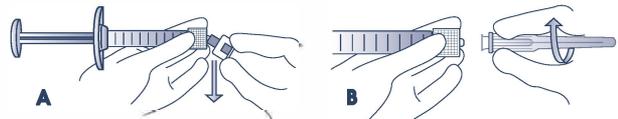

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 seringa pré-cheia de uso único (75 mg de ácido hialurônico reticulado em 3 ml de solução fisiológica tamponada).
Seringa esterilizada por calor húmido.

REF DOC801

